

ADVENT *life*
Health in Your Hands

Медицински тестове за лична употреба



Медицински тестове за лична употреба, на които можете да се доверите

Искате бърз отговор какво се случва в тялото ви?

Точната и навременна информация е ключ към правилната грижа за здравето и превенцията на заболявания. Можете да откриете отклонението още преди появата на симптоми, да разберете причините за състоянието си или дали имате нужда от медицинска консултация. Дори да нямате симптоми, бъдете наясно със здравословното си състояние - превенцията е ключът към доброто здраве.

- Клинично доказана достоверност
- Без чакане, без неудобни часове, без стрес
- Резултат само за 10-15 минути
- Лесно и дискретно - без лични данни
- Достъп до медицински услуги дори в най-отдалечените райони

За една по-информирана и независима грижа за здравето

Ние предоставяме качествени и иновативни продукти, които позволяват на всеки да се грижи за здравето си по един по-информиран, комфортен и дискретен начин.

Нашите бързи тестове за домашна диагностика предлагат лесни и удобни решения за превенция и отговорно отношение към здравето. Портфолиото ни включва най-широкия спектър от бързи тестове в различни категории, като продължава да се обогатява. Продуктите ни са безопасни и лесни за използване, със сертифицирано качество и клинично доказани резултати.

Нашата цел е да променим подхода към грижата за здравето, така че все повече хора да могат предварително да проверяват специфични здравни показатели бързо и самостоятелно.

Направете следващата крачка към по-добро здраве – уверено, информирано и навреме.

Последвайте ни във Facebook и Instagram:



Facebook



Instagram

Тест за бременност с дигитален дисплей

Когато очаквате отговор на един от най-важните въпроси в живота си, искате той да бъде ясен, точен и лесен за разчитане. Дигиталният тест за бременност на Advent Life елиминира несигурността при тълкуване на резултата, като вместо линии показва изричен отговор – „**Yes+**“ или „**No-**“ на цифров дисплей.

Основни предимства:

- Дигитален дисплей, показващ резултата с думи - **YES** или **NO** - без съмнения и неясни черти
- Стриймър тест за бърза и лесна употреба - без необходимост от чашка или пипета
- Резултат само за 3 минути
- Точност над 99% още от първия ден на закъснението

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива наличието на човешки хорионгонадотропин (hCG)– хормон, произвеждан по време на бременността. С чувствителност от 25 mIU/mL, той може да открие бременност още от първия ден на закъснение на менструацията.



Как се прави тестът?

1. Извадете теста от опаковката и премахнете предпазната капачка.
2. Задръжте абсорбиращия връх под струя урина за 5 секунди или го потопете в съд с урина за 10 секунди.
3. Поставете теста хоризонтално и отчетете резултата на дисплея след 3 минути.

Комплектът включва:

- Дигитален тест за бременност
- Инструкция за употреба

99%
Клинично
доказана
точност



Тест за ранно откриване на бременност

Бърз, чувствителен и лесен за използване

Тестът за ранно откриване на бременност Advent Life е с **чувствителност от 10 mIU/mL**, което го прави изключително прецизен още преди закъснение на менструалния цикъл.

Основни предимства:

- 99% точност
- Чувствителност 10 mIU/mL за ранен резултат 5 дни преди очакваната менструация
- Бърз резултат само за 3 минути
- Стриймър тест за бърза и лесна употреба - без необходимост от чашка или пипета

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива наличието на човешки хорионгонадотропин (hCG) – хормон, произвеждан по време на бременността. С чувствителност от 10 mIU/mL, той може да открие бременност още **5 дни преди деня на очакваната менструация.**

Опаковката съдържа 2 стриймър теста. Използвайте първия тест 5 дни преди очакваната менструация, а втория - на първия ден от закъснението на цикъла, за да потвърдите резултата.



Комплектът включва:

- 2 теста за бременност
- Инструкция за употреба

Как се прави тестът?

Можете да се тествате по всяко време на денонощието. Отстранете капачката на теста и използвайте един от двата метода за употреба:

МЕТОД 1: Поставете абсорбиращия накрайник на тест устройството директно под струя от урина за най-малко 15 секунди.

или

МЕТОД 2: Вземете проба от урина в чист, сух контейнер, поставете абсорбиращия накрайник на теста в пробата за най-малко 15 секунди.

Отчетете резултата след **3 минути.**



Тест за бременност Classic

Тестът открива в урината хормон, който тялото произвежда по време на бременност - човешки хорионгонадотропин (hCG). С чувствителност от 25 mIU/mL, той може да открие бременност още от първия ден на закъснение на менструацията.

Основни предимства:

- Точност над 99% още от първия ден на закъснението
- Бърз резултат за 3 минути
- Можете да се тествате по всяко време на денонощието

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива наличието на човешки хорионгонадотропин (hCG) – хормон, произвеждан по време на бременността. С чувствителност от 25 mIU/mL, той може да открие бременност още от първия ден на закъснение на менструацията.

Как се прави тестът?

Вземете проба от урина в чист, сух контейнер и капнете 3 капки урина с пипетата в обозначената ямка. Отчетете резултата след 3 минути. Не отчитайте резултата след повече от 10 минути.

Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Инструкция за употреба



Тест за овулация

Планирате бременност? Не пропускайте най-важния момент – всеки месец в рамките на един цикъл само 48 часа са с най-висок шанс за зачеване. С теста за овулация можете лесно и сигурно да засечете фазата на овулация и да откриете тези два най-фертилни дни в месеца.

Основни предимства:

- 10 тест ленти, достатъчни за 10 дни ежедневно тестване – по-дълъг период на наблюдение за сигурен резултат, особено важно при нерегулярен цикъл
- Контейнер за проба в опаковката
- Клинично доказана точност над 99,9% точност
- Резултат само за 5 минути
- Не изисква първа сутрешна урина

Какво представлява тестът и какво отчита?

Малко преди овулацията настъпва внезапно и рязко покачване на лутеинизиращия хормон (LH) в урината. Тестът за овулация открива този LH пик, което е ясен сигнал, че овулацията вероятно ще настъпи през следващите 24-36 часа. Вероятността за зачеване е най-висока именно през този фертилен период.

Как се прави тестът?

Определете на кой ден от цикъла да започнете тестването, като използвате таблицата в инструкциите. Съберете урина по едно и също време всеки ден. Потопете тестовата лента в пробата за 10-15 секунди. Отчетете резултата след 5 минути, но не по-късно от 10 минути.



Комплектът включва:

- 10 тест ленти
- Контейнер за проба
- Инструкция за употреба

99,9%
Клинично
доказана
точност



Научете
повече

Мено-Сheck® – Бърз тест за менопауза (FSH)

**Цикълът ви се променя и имате проблеми със съня?
Възможно е да навлизате в менопауза.**

Фоликулостимулиращият хормон (FSH) е основен показател за репродуктивното здраве и един от ключовите маркери за настъпване на менопаузата. По време на репродуктивната възраст нивата на FSH са ниски. С приближаване на менопаузата – при т.нар. перименопауза – нивата му започват да се покачват.

Менопаузата е естествен етап в живота на всяка жена, но симптомите ѝ – топли вълни, нередовен цикъл, безсъние, раздразнителност – могат да повлияят сериозно на ежедневието. Проверка на хормоналните нива помага за яснота и навременна грижа.

Какви са симптомите при менопауза?

- Нередовен или липсващ месечен цикъл
- Топли вълни
- Раздразнителност, депресивно настроение
- Суха кожа и косопад
- Костна слабост (остеопороза), болки в ставите
- Нарушена концентрация

Тестът не е подходящ за:

- Бременни или кърмещи
- Жени, използващи хормонална терапия или контрацепция
- Жени с поликистозни яйчници или след хирургични интервенции, засягащи цикъла

Какво представлява Мено-Сheck® и какво отчита?

Мено-Сheck® е бърз тест с проба от урина, който измерва нивото на фоликулостимулиращ хормон (FSH) – основен маркер за менопауза. При стойности ≥ 25 mIU/mL резултатът е положителен. Тестът дава резултат за 10 минути.



Какво означава положителен резултат?

Ако тестовата линия е по-тъмна или равна на контролната, това означава, че вероятно сте в процес на менопауза. Препоръчва се повторен тест след 5–7 дни за потвърждение. Ако и двата са положителни, се консултирайте с гинеколог.

Комплектът включва:

- 2 тест устройства
- Инструкция за употреба

Процедура: Потопете абсорбиращия накрайник в потока урина или в съд с урина за 10 секунди. След 10 минути отчетете резултат. Най-добре е да използвате първата урина за деня.

92,8%
Клинично
доказана
точност



Научете
повече

Тест за щитовидна жлеза Thyro-Check® – Бърз тест за откриване на хипотиреозидизъм

Чувствате се уморени, студено ви е и имате суха кожа?
Причината може да е хипотиреозидизъм.

Щитовидната жлеза регулира метаболизма, телесната температура и хормоналния баланс. Хипофункцията (хипотиреозидизъм) е особено често срещана при жените и често остава недиагностицирана. Симптомите включват умора, наддаване на тегло, суха кожа, депресия и усещане за студ. Навременното откриване на хормонален дисбаланс дава възможност за ранна лекарска намеса и подобряване на качеството на живот.

Какви са симптомите при хипотиреозидизъм?

- Постоянна умора
- Наддаване на тегло
- Суха кожа и чуплива коса
- Забравяне, депресивно настроение
- Чувство за студ
- Запек
- Нарушения в менструалния цикъл

Какво представлява Thyro-Check® и какво отчита?

Thyro-Check® е бърз имунодиагностичен тест за домашна употреба, който измерва нивото на TSH (тиреоидстимулиращ хормон) в кръвта. Повишените нива на TSH показват недостатъчно активна щитовидна жлеза. Тестът се извършва с капка кръв от пръста и дава резултат след 10 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на две цветни линии (Т и С) показва повишено ниво на TSH – маркер за възможен хипотиреозидизъм. Това налага консултация с лекар, който ще назначи допълнителни лабораторни изследвания.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути.



Комплектът включва:

- 2 тест устройства
- Инструкция за употреба
- Пипета
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба

98,1%
Клинично
доказана
ТОЧНОСТ



Научете
повече



Видео
инструкция

Бърз тест за стрептококи от група А (скарлатина)

Защо да проверявате за стрептококова инфекция?

Стрептококите от група А (*Streptococcus pyogenes*) са бактерии, които причиняват ангина, скарлатина и други инфекции на гърлото. Нелекувани, тези инфекции могат да доведат до усложнения като ревматична треска или бъбречни възпаления. Ранното откриване на бактериалната причина е важно за навременно и адекватно лечение.

Какви са симптомите при стрептококова инфекция?

- Възпалено и зачервено гърло
- Болка при преглъщане
- Висока температура
- Забравяне, депресивно настроение
- Увеличени лимфни възли на шията
- Малинов език или обрив (при скарлатина)

Какво представлява Strep A Test® и какво отчита?

Strep A Test е бърз хроматографски имуноанализ за лична употреба, който открива антигени на стрептококи от група А в проба от гърлен секрет. Тестът използва специфични антитела и дава резултат само за 5 минути.



Какво означава положителен резултат?

Появата на две линии – в тестовата и контролната зона – показва наличие на антигени на стрептококи А. Това потвърждава бактериална инфекция и налага консултация с лекар за започване на антибиотично лечение.

Процедура: С помощта на тампона се взема проба от сливиците и гърлото, след което пробата се обработва с реактиви и се добавя в тестовата касета. Резултатът се разчита след 5 минути.

Комплектът включва:

- Тест касета
- Тампон за гърло
- Буферен разтвор 1 и 2
- Епруветка
- Капкомер
- Инструкция за употреба

97,1%
Клинично
доказана
точност



Научете
повече

Бърз тест за Helicobacter Pylori (язва на стомаха)

**Имате болки в стомаха и липса на апетит?
Причината може да е гастрит или язва.**

H. Pylori, съкратено от Helicobacter Pylori (Хеликобактер пилори), е вид бактерия, която може да колонизира обвивката на стомаха и червата. Тази бактерия е известна със своята способност да предизвиква различни гастроинтестинални заболявания, включително функционална диспепсия, дуоденална и пептична язва на стомаха, както и активен хроничен гастрит. Без лечение може да доведе до хронични стомашни болки, подуване, и дори повишен риск от рак на стомаха. Навременната диагноза е ключова за ефективно лечение.

Какви са симптомите при инфекция с H.Pylori?

- Болка в стомаха
- Киселини и оригване
- Подуване, гадене
- Загуба на апетит
- Язви или гастрит
- Забравяне, депресивно настроение

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива антигени на H. pylori в проба от фецес. Това е неинвазивен, качествен имунохроматографски метод за диагностициране на активна инфекция. Резултатът се разчита след 15 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на две цветни линии – тестова и контролна – показва наличие на активна инфекция. Необходимо е да се консултирате с гастроентеролог за лечение.

Процедура:

Съберете проба от изпражнения с апликатора, поставете го във флакона с буферния разтвор, за да ги смесите. Капнете 2-3 капки в касетата и след 15 минути разчетете резултата.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Епруветка с буферен разтвор и апликатор за проба
- Инstrukция за употреба

99,2 %
Клинично доказана точност



Научете повече

ROTADENO-Screen® – Бърз тест за рота- и аденовирус

**Страдате от стомашно неразположение и отпадналост?
Проверете за наличието на ротавирус и аденовирус.**

Рота- и аденовирусът са водещи причини за вирусен гастроентерит при деца и възрастни. Аденовирусът обикновено се свързва с гастроентерит, но също така и с много други заболявания, като фарингит, бронхит или кератоконюнктивит. Тези инфекции се разпространяват лесно и могат да доведат до тежка дехидратация. Навременното откриване на вирусната причина помага да се избегне ненужно антибиотично лечение и да се започне адекватна рехидратация.

Какви са симптомите?

- Водниста диария
- Повръщане
- Висока температура
- Отпадналост
- Болки в корема
- Забравяне, депресивно настроение

Защо да изберете ROTADENO-Screen®?

- Открива и двата вируса едновременно
- Бърз и надежден резултат у дома
- Особено полезен при малки деца и възрастни хора
- Подпомага вземането на точни медицински решения

Какво представлява тестът и какво отчита?

ROTADENO-Screen® е качествен имуно-хроматографски скринингов тест за откриване на ротавирус и/или аденовирус във фекална проба. Разполага с две тестови зони – за всеки от вирусите – и дава резултат за 10 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на цветни линии в тестовите зони показва наличие на ротавирус и/или аденовирус в пробата. Препоръчва се да се консултирате с лекар, особено ако сте с намален имунитет, и да му покажете резултатите от теста.

Процедура: Съберете проба с помощта на стика, поставете във флакона с разтвор и капнете по 5 капки във всяка отворена зона на касетата. Изчакайте 10 минути и разчетете резултата.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Буферен разтвор
- Хартия за събиране на проба
- Инструкция за употреба

97%
Клинично
доказана
точност

CRP-Screen® – Бърз тест за възпаление и инфекция

Имате симптоми на грип или възпаление?

Проверете наличието и степента на тежест на инфекцията или възпалението.

C-реактивният протеин (CRP) е ключов маркер за наличие на възпаление или инфекция в организма. Високите стойности могат да сигнализират за бактериална инфекция, автоимунно заболяване или възпалителен процес. Тестът е особено полезен при неясни симптоми като висока температура, втрисане или отпадналост.

Какви са симптомите?

- Втрисане и треска
- Главоболие и мускулни болки
- Отпадналост
- Загуба на апетит
- Болка при възпаления

Какво представлява тестът и какво отчита?

CRP-Screen® измерва нивото на CRP в кръвна проба от пръста. Тестът отчита дали стойностите са под, в границите на средно завишени (8–40 mg/L) или силно завишени (над 100 mg/L) – в зависимост от наситеността на тестовите линии.

Какво означава положителен резултат?

Повишеното ниво на CRP е знак за възпаление или активна инфекция.

При здрави пациенти концентрацията на CRP е по-ниска от 8 mg/L, докато в случай на тежка инфекция или по време на възпалителен процес нивото на концентрацията може да бъде по-високо от 100 mg/L. При резултати над 100 mg/L се препоръчва спешна медицинска консултация.

Средните нива, между 8 и 100 mg/L, са съпътствани от по-леки вирусни или бактериални инфекции.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Ланцет
- Пипета
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба



Научете повече

4-в-1 Тест за инфекции на пикочните пътища

**Уринирате често и имате болки ниско в корема?
Причината може да е инфекция на пикочните пътища.**

Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) са често срещано състояние при жени, мъже и деца. Те могат да причинят дискомфорт, болка и дори да доведат до бъбречни усложнения, ако не се лекуват своевременно. Ранната диагностика е ключова за ефективно лечение.

Какви са симптомите?

- Парене при уриниране
- Често уриниране
- Мътна или остра на мирис урина
- Болки ниско в корема или кръста
- Кръв в урината

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестовият комплект съдържа 2 реагентни ленти, анализиращи 4 параметъра:

- **Левкоцити:** Наличието на левкоцити в урината е важен симптом на възпаление на бъбреците и пикочните пътища.
- **Кръв:** Наличието на окултна кръв в урината най-често е резултат от инфекции, камъни в бъбреците, травма или тумори в отделителната система.
- **Нитрити:** Нитритите не се откриват в урината при нормални обстоятелства и наличието им може да бъде индикатор за бактериална инфекция на пикочните пътища.
- **Протеин:** Протеин в урината (протеинурия) може да бъде индикатор за възпаление на пикочния мехур/простатата или кръвене в пикочните пътища.

Процедура: потопете лентата в урина за 1–2 секунди, поставете върху чиста повърхност и след 2 минути сравнете цветовете със скалата. Отчетете всеки параметър поотделно.

Какво означава положителен резултат?

Промяна в цвета на някоя от реактивните зони показва наличие на съответното вещество в урината. Това е индикатор за възможна инфекция и налага консултация с лекар.



Комплектът включва:

- 2 тест ленти с реагентни зони
- 2 пластмасови чашки
- Цветна скала
- Инструкция за употреба



Научете повече

10-в-1 Реагентни тест ленти за анализ на урина

Дори да нямате симптоми, проверете състоянието си по 10 важни параметъра на урината. Може да откриете важен здравословен проблем.

Анализът на урината е бърз и неинвазивен метод за откриване на редица здравословни състояния още преди да се проявят сериозни симптоми. С помощта на този тест можете да засечете признаци на инфекции на пикочните пътища (ИПП), бъбречни заболявания, диабет, чернодробни нарушения и други състояния, изискващи навременна реакция.

Какви са симптомите?

- Парене при уриниране
- Болка в долната част на корема
- Често и болезнено уриниране
- Мътна или с необичаен цвят урина
- Силен мирис на урината
- Умора, повишена жажда, необяснима загуба на тегло

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът представлява ленти с реагентни зони, които отчитат концентрацията на 10 различни показателя в урината. Чрез промяна на цвета, всяка зона сигнализира за наличието или отклонението на дадено вещество. Тълкуването на резултатите се извършва чрез сравнение с цветна скала.

Тест лентата отчита следните 10 параметъра:

Глюкоза (GLU) – индикация за диабет или нарушен глюкозен метаболизъм

Билирубин (BIL) – маркер за чернодробна дисфункция

Кетони (KET) – метаболитен показател при диабет или гладуване

Специфично тегло (SG) – концентрация на урината, свързана с хидратация и бъбречна функция

Кръв (BLO) – индикация за увреждане, възпаление или камъни

pH – измерва киселинността/алкалността на урината

Протеин (PRO) – показва възможна бъбречна дисфункция

Уробилиноген (URO) – допълнителен чернодробен маркер

Нитрити (NIT) – продукт от бактериална активност, свързана с ИПП

Левкоцити (LEU) – присъствие на бели кръвни клетки, показател за възпаление

Какво означава положителен резултат?

Промяна на цвета в една или повече зони е сигнал за възможно отклонение в здравословното състояние.



Комплектът включва:

- 100 тест ленти
- Цветна скала за сравнение
- Инструкция за употреба



Научете повече

Комбиниран антигенен тест 6-в-1 FluA&B/2019-nCoV/RSV/ADV/MP

Бърза и надеждна диагностика при симптоми на вирусна инфекция

Когато симптомите са сходни – треска, кашлица, хрема, диария – е важно бързо да се установи причинителят на инфекцията. С този тест можете да разграничите шест от най-честите вирусни заболявания при деца и възрастни само с една проба.

Какво представлява тестът и какво отчита?

Комбинираният антигенен тест е качествен имунохроматографски анализ, предназначен за бързо и качествено откриване на:

- Грив А
- Грив В
- SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
- Респираторен синцитиален вирус (RSV)
- Аденовирус (ADV)
- Антиген на *Mycoplasma pneumoniae* (MP)



Тестът използва назофарингеални или орофарингеални проби и предоставя резултати в рамките на 15 минути.

Грипът се разпространява чрез респираторни капчици и достига своя пик през есента и зимата.

COVID-19 има инкубационен период от 1 до 14 дни и причинява симптоми като висока температура, умора и кашлица.

RSV засяга предимно деца, предава се по капков път и също достига пик през зимните месеци.

Аденовирусът причинява както респираторни, така и стомашно-чревни инфекции.

Mycoplasma pneumoniae, основен причинител на атипична пневмония, се разпространява целогодишно, като честотата му нараства през есента и зимата.

Комплектът включва:

- Тест касета
- 2 стерилни тампона
- Епруветка с буферен разтвор
- Инструкция за употреба



Комбиниран бърз тест за SARS-CoV-2 и грип А/В

Точна диагностика при симптоми на вирусна инфекция

COVID-19 е остро респираторно инфекциозно заболяване, причинено от SARS-CoV-2. Най-често срещаните симптоми са кашлица и повишена температура, но е възможно да се появят и болки в гърлото, главоболие и болки в мускулите, както и обща отпадналост и задух. Гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, промяна или загуба на вкус и обоняние са някои от по-рядко срещаните признаци на заболяването.

Грипът се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица и болки в гърлото, придружени с главоболие и/или болки в мускулите и ставите. Пациентът може да усети също и обща слабост, втрисане, изпотяване, загуба на апетит, хрема и гадене. Най-честото усложнение при грипа е пневмонията. Грипните симптоми обикновено продължават повече от седмица.

Симптомите на COVID-19, грип А и грип В често са сходни – висока температура, кашлица, отпадналост. Този комбиниран тест предоставя бързо и надеждно решение за едновременно откриване на трите най-чести вирусни причинители на респираторни инфекции.

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът е качествен имунохроматографски анализ за откриване на:

- Антигени на SARS-CoV-2
- Антигени на грип тип А
- Антигени на грип тип В

Тестът използва назална проба и дава резултат само за 15 минути.

Как се прави тестът?

1. Вземете проба: Въведете стерилния тампон в двете ноздри, като го завъртите няколко пъти.
2. Подгответе разтвора: Поставете тампона в епруветката с буфер и разбъркайте добре.
3. Добавете в касетата: Капнете 3 капки в ямката за проба. Изчакайте 15 минути и отчетете резултата.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Стерилен назален тампон
- Епруветка с буферен разтвор
- Накрайник с капкомер
- Плик за биологични отпадъци
- Инструкция за употреба



Бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (назална проба)

Симптомите на грип и COVID-19 често се припокриват – висока температура, кашлица, отпадналост. Навременното тестване помага да се разграничи инфекцията и да се вземат правилни мерки – изолация, лечение или наблюдение.

Какви са симптомите?

- Висока температура
- Кашлица, възпалено гърло
- Мускулни болки, втрисане
- Умора, главоболие

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива антигени на SARS-CoV-2 в назални проби. Това е качествен имуно-анализ за домашна употреба, който дава резултат само за 15 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на две цветни линии – в контролната (С) и тестовата (Т) зона – показва наличие на вирусна инфекция. Ако резултатът е положителен, следвайте местните здравни указания и се консултирайте с медицински специалист.

Как да си направите теста:

1. Поставете тампона в едната си ноздра и завъртете 5-10 пъти.
2. Повторете процедурата и в другата ноздра.
3. Поставете тампона в епруветката с буферния разтвор, като го разбъркате добре.
4. Добавете 3 капки от смесения разтвор в ямката за проба на тест касетата.
5. Изчакайте 15 минути и разчетете резултата.

Не интерпретирайте резултата след 20 минути или повече.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Стерилен тампон
- Буферен разтвор
- Плик за биологични отпадъци
- Епруветка с буфер за екстракция
- Инструкция за употреба



Научете повече

Бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (проба от слюнка)

Симптомите на COVID-19 варират – от леки до тежки – и често наподобяват настинка или грип. Бързото тестване позволява ранно откриване на вируса, ограничаване на разпространението и своевременно предприемане на медицински действия.

Какви са симптомите?

- Висока температура
- Кашлица, болки в гърлото
- Главоболие, умора
- Загуба на вкус или обоняние
- Мускулни болки, втрисане

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът открива наличието на нуклео-капсидни протеинови антигени на SARS-CoV-2 в проби от слюнка, особено по време на острата фаза на инфекцията. Без нужда от тампон или назална проба, тестът предлага удобно и безболезнено решение, подходящо и за деца. Резултат се получава в рамките на 15 минути.



Какво означава положителен резултат?

Положителният резултат показва наличието на вирусни антигени на SARS-CoV-2. Ако резултатът от теста е отрицателен, но симптомите продължават, се препоръчва допълнителна консултация с медицински специалист.

Как да си направите теста:

1. Поставете абсорбиращия връх на теста в устата.
2. Оставете го да се напои добре със слюнка (около 1 минута).
3. Извадете и поставете върха в епруветката с разтвор.
4. Завъртете няколко пъти, за да се смеси добре пробата.
5. Добавете 2–3 капки от сместа в пробната ямка на тест касетата.
6. Изчакайте 15 минути и разчетете резултата. Не разчитайте след 20 минути или повече.

Комплектът включва:

- Тест устройство
- Плик за биологични отпадъци
- Инструкция за употреба



Научете повече

Liver-Screen® – Бърз тест за функцията на черния дроб

Изпитвайте слабост, липса на апетит и урината ви е по-тъмна от обичайното? Може да имате чернодробно нарушение.

Черният дроб е основен орган за пречистване на кръвта, метаболизъм и складиране на хранителни вещества. Неговите увреждания често остават незабелязани в ранна фаза. Симптоми като умора, жълтеница, подуване на корема или промени в цвета на урината и изпражненията може да сигнализират за проблеми с черния дроб. Навременният тест помага за ранна реакция и медицинска намеса.

Какви са симптомите?

- Жълтеница (пожълтяване на очи/кожа)
- Потъмняване на урината
- Светли изпражнения
- Умора и слабост
- Безапетитие
- Подуване на корема

Какво представлява тестът и какво отчита?

Liver-Screen® е качествен имуно-диагностичен тест, който открива повишени нива на чернодробните ензими ALT и AST в кръвна проба от пръста. Те се повишават при възпаление, увреждане или заболяване на черния дроб. Тестът дава резултат за 10 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на една или две червени линии, заедно със синя контролна линия, показва повишени трансаминази – знак за възможно увреждане на черния дроб. Препоръчва се консултация с лекар и допълнителни изследвания.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Ланцет
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба

95,8 %
Клинично доказана точност



Научете повече



Видео инструкция

FOB Тест за окултно кървене

Окултното кървене в изпражненията представлява следи от кръв, които не могат да се видят с просто око. В ранните етапи на стомашно-чревните заболявания, като рак на дебелото черво или стомаха, ентeрална язва, полипи, язвен колит, дивертикулит и фисури, може да няма никакви видими симптоми, а само окултно кървене. Тестът за окултно кървене е предназначен за самостоятелно тестване и домашна употреба, но е препоръчително резултатите от него да бъдат обсъдени с лекар.

За кого е подходящ тестът?

- За лица над 50-годишна възраст се препоръчва тестване всяка година.
- При фамилна обремененост, редовното тестване трябва да започне след 40-годишна възраст.

Какво представлява тестът и какво отчита?

FOB Тест за окултно кървене е бърз имуноанализ за качествено откриване на човешка окултна кръв в изпражненията. Тестът е ин витро диагностично средство за самостоятелно тестване.

Как се прави тестът?

Съберете проба с помощта на пръчицата в епруветката. Поставете пръчицата обратно в епруветката и добавете 2~3 капки от разтвора с пробата в ямката на тест касетата.

Разчетете резултата след 10 минути.



Какво означава положителен резултат?

Положителният резултат означава, че е открито окултно кървене. Това **не** означава, че тестът ви е положителен за рак или друго заболяване.

При положителен резултат, консултирайте се с лекар за допълнителни изследвания.

Комплектът включва:

- Тест касета
- 1,5 mL буферен разтвор
- Инструкция за употреба

99,9%
Клинично доказана
точност



Научете
повече

Тест за желязодефицитна анемия Ferri-Check®

Бърз тест за дефицит на желязо

**Често се чувствате уморен, имате бледа кожа или главоболие?
Причината може да е дефицит на желязо.**

Желязото е жизненоважен елемент за производството на хемоглобин – протеинът, който пренася к кислород в тялото. Недостигът му води до желязодефицитна анемия и засяга особено често жени в репродуктивна възраст и деца. Симптомите може да се развият бавно и да останат незабелязани. Ранното откриване помага за навременно лечение и подобряване на качеството на живот.

Какви са симптомите на желязодефицитната анемия?

- Постоянна умора
- Главоболие
- Бледа кожа
- Сърцебиене
- Задух при усилие
- Нарушена концентрация

Кои са рисковите групи?

- Жени с обилен менструален цикъл или бременни
- Деца и тийнейджъри в активен растеж
- Вегани и вегетарианци
- Спортисти

Какво представлява Ferri-check® и какво отчита?

Ferri-Check® е бърз имунодиагностичен тест за домашна употреба, който измерва нивото на феритин – основният индикатор за запасите от желязо в организма. С помощта на капка кръв от пръста и включените в комплекта компоненти, тестът дава резултат само за 10 минути.

Какво означава положителен резултат?

Появата на една линия в контролния прозорец (C) означава ниски нива на феритин – сигнал за потенциален недостиг на желязо. Това налага консултация с лекар и допълнителни изследвания. Липсата на достатъчно желязо може да е резултат от неправилно хранене, обилна менструация, бременност, хронично кървене или нарушено усвояване.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Ланцет
- Буферен разтвор
- Инструкции за употреба

98%
Клинично
доказана
ТОЧНОСТ



Бърз тест за витамин D

**Имате лошо настроение и се уморявате бързо?
Може да имате дефицит на витамин D.**

Витамин D е ключов за доброто здраве – той регулира калция и фосфата в тялото и поддържа здравето на костите и зъбите. Дефицитът му е признат за глобална епидемия. Всяка наша клетка има рецептори за витамин D, което го прави необходим за правилното функциониране на организма. Установена е връзка между липсата на витамин D и редица сериозни заболявания: остеопороза, множествена склероза, сърдечни болести, усложнения при бременност, диабет, депресия, инсулт, автоимунни и инфекциозни болести, рак, затлъстяване и други.

Какви са симптомите?

- Честа умора и отпадналост
- Болки в костите и ставите
- Повишена склонност към инфекции
- Лошо настроение, депресия
- Мускулна слабост

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът е бърз хроматографски имуноанализ за полуколичествено измерване на 25-хидроксивитамин D в кръвна проба от пръста. Сравнението с цветната карта ви дава добра индикация дали нивата ви на витамин D са достатъчни (>30 ng/ml), недостатъчни (10-30 ng/ml) или дефицитни (<10 ng/ml).

Какво означава резултат под нормата?

Наситеност на тест линията, показваща ниво под 30 ng/mL, сигнализира дефицит или недостиг на витамин D.

Необходимо е да се консултирате с лекар относно възможността за допълнителни изследвания и прием на добавки.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Ланцет
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба

94,4%
Клинично
доказана
точност



Allergy-Check® – Бърз тест за алергични реакции

**Очите ви сърбят, кихате често и кожата ви се зачервява?
Причината може да е алергия.**

Алергиите могат да засегнат хора от всички възрасти – от деца до възрастни – и често се бъркат с вирусни инфекции. Зачервяване на кожата, сърбеж, сълзене на очите, кихане или оток може да са сигнали за алергия. Ако имате такива симптоми или фамилна обремененост, бързият тест Allergy-Check® ще ви даде ясна представа дали в организма ви циркулират повишени нива на IgE – основният имуноглобулин, свързан с алергични реакции.

Какви са симптомите?

- Зачервяване или обрив по кожата
- Често кихане
- Сълзене или сърбеж в очите
- Оток на устните или езика
- Храносмилателни оплаквания след определени храни

Какво представлява Allergy-Check® и какво отчита?

Allergy-Check® е скринингов имуно-диагностичен тест за домашна употреба, който отчита повишено ниво на IgE в кръвна проба от пръста. Резултатът показва общата алергична чувствителност и може да насочи към по-нататъшни изследвания.

Какво означава положителен резултат?

Появата на две цветни линии (С и Т) означава, че в кръвта има повишено ниво на IgE – маркер за алергично предразположение. Препоръчва се консултация с лекар или алерголог за по-точна диагностика и индивидуализирано лечение.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути. Тестът е за еднократна употреба и се извършва у дома, без нужда от специално оборудване.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Ланцет
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба

97,03%
Клинично
доказана
ТОЧНОСТ



Gluten'Alarm® – Бърз тест за непоносимост към глутен

Имате проблеми с храносмилането и често сте уморени?

Причината може да е непоносимост към глутен.

Целиакията е аутоимунно заболяване, при което приемът на глутен – протеин в пшеницата, ечемика и ръжта – предизвиква увреждане на тънките черва. Среща се при около 1% от населението, често остава неразпозната, а нелекуваната целиакия може да доведе до хронична умора, анемия, остеопороза и храносмилателни проблеми. Навременното откриване позволява започване на лечение с безглутенова диета и облекчаване на симптомите.

Какви са симптомите?

- Чести храносмилателни смущения (диария, газове, подуване)
- Постоянна умора
- Анемия
- Болки в корема
- Забавен растеж при деца
- Загуба на тегло
- Кожни обриви

Какво представлява Gluten'Alarm® и какво отчита?

Gluten'Alarm® е скринингов имунохроматографски тест за домашна употреба, който открива антитела тип IgA срещу тъканна трансглутаминаза (t-TG) в кръвна проба от пръста. Това е основен маркер за диагностика на целиакия. Тестът е лесен за изпълнение и дава резултат само за 15 минути.

Какво означава положителен резултат?

Положителният резултат означава, че организмът реагира срещу глутен и може да е налице аутоимунен процес. Необходимо е да се консултирате с лекар за потвърждение и последващо изследване.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 15 минути.

Тестът е за еднократна употреба и се извършва у дома, без нужда от специално оборудване.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Пипета
- Ланцет
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба



97%
Клинично
доказана
точност

PROSTA-Check® – Бърз тест за здравето на простатата

Често уриниране, болка или парене при уриниране?
Причината може да проблем с простатата.

Простатно-специфичният антиген (PSA) е важен маркер за физиологичното състояние на простатата. Повишеното му ниво може да сигнализира за хиперплазия, възпаление или дори рак. Скринингът след 50-годишна възраст е особено препоръчителен за мъже с фамилна обремененост.

Какви са симптомите?

- Често уриниране
- Слаба струя урина
- Болка или парене при уриниране
- Болка в кръста или таза
- Кръв в урината или спермата

Какво представлява PROSTA-Check® и какво отчита?

Тестът измерва PSA в капка кръв от пръста и отчита дали стойността е над 4 ng/mL – границата, определена от СЗО. Резултатът се получава за 10 минути и се интерпретира чрез тестова и контролна линия.

Какво означава положителен резултат?

Появата на две цветни линии (Т и С) показва повишено ниво на PSA. Препоръчва се консултация с уролог за потвърждение и допълнителна диагностика.

Процедурата е лесна и безболезнена: вземете капка кръв от пръста, поставете я в тест касетата, добавете разтвора и изчакайте 10 минути.



Комплектът включва:

- Тест касета
- Ланцет
- Пипета
- Буферен разтвор
- Инструкция за употреба

97%
Клинично
доказана
точност



Бърз комбиниран тест за наркотици 4-в-1

Проверка за употреба на наркотици може да е необходима по медицински, юридически или лични причини. Скрининг тестът осигурява бърза и дискретна информация за наличието на забранени вещества.

Какви са симптомите?

- Необяснима еуфория или сънливост
- Промени в поведението
- Разширени зеници
- Липса на координация
- Загуба на апетит или тегло

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът е хроматографски имуноанализ за качествено откриване на 4 наркотика в проба от урина в следните гранични концентрации:

АМР (Амфетамини) - 1000ng/ml
(Може да се открие до 2 дни след употреба).

ТНС (Марихуана) - 50ng/ml
(Може да се открие от няколко часа до 3-5 дни след употреба).

СОС (Кокаин) - 300ng/ml
(Може да се открие до 3 дни след употреба).

ОПИ (Опиати) - 2000ng/ml
(Може да се открие до 4 дни след употреба).

Какво означава положителен резултат?

Появата на линия в тестовата зона означава отрицателен резултат. Ако в съответната тестова зона липсва цветна линия, това показва наличие на наркотика в концентрации над допустимата граница. При положителен резултат се препоръчва допълнителен лабораторен анализ.

Процедура: Потопете лентите вертикално в проба от урина за 10-15 секунди. Поставете я на равна повърхност и отчетете резултата след 5 минути.



Комплектът включва:

- Тест панел
- Инструкция за употреба

99.9%
Клинично
доказана
точност



Научете
повече

Бърз комбиниран тест за наркотици 12-в-1

Мултикомпонентните тестове дават възможност за пълна картина на потенциална употреба на различни вещества. Полезни са при контрол в работна среда, рехабилитация или личен мониторинг.

Какви са симптомите?

- Изразени промени в поведение
- Физически признаци – тремор, сънливост, изпотяване
- Проблеми с памет, сън или внимание
- Отказ от хранене или контакт

Какво представлява тестът и какво отчита?

Тестът е предназначен за проверка на интоксикацията и осигурява качествен, предварителен резултат. Тестът представлява бърз имуноанализ на урина, който открива едновременно 12 различни наркотика при следните гранични концентрации:

Амфетамини (AMP) – 1000 ng/mL

Бензодиазепини (BZO) – 300 ng/mL

Кокаин (COC) – 300 ng/mL

Марихуана (THC) – 50 ng/mL

Метадон (MTD) – 300 ng/mL

Метамфетамин (MET) – 1000 ng/mL

Метилendioксиметамфетамин (MDMA)
– 500 ng/mL

Опиати (OPI) – 2000 ng/mL

Трициклични антидепресанти (TCA) –
1000 ng/mL


Кетамин (KET) – 1000 ng/mL

Синтетичен канабис (K2) – 50 ng/mL

Фентанил (FTY) – 20 ng/mL

Какво означава положителен резултат?

В контролната област (C) се появява цветна линия. В тестовата област (T) **не се появява цветна линия**. Това показва **положителен резултат** за наркотика, съответстващ на областта на теста без цветна линия. За потвърждение се препоръчва лабораторен анализ (напр. GC/MS).

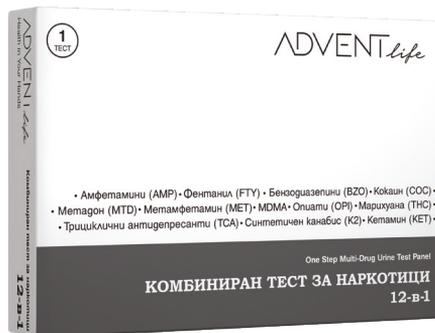

Комплектът включва:

- Тест панел
- Инструкция за употреба

Процедура: Потопете абсорбиращия край в урина за поне 10 секунди. Поставете теста върху равна повърхност и отчетете резултата след 5 минути.



Научете повече

Медицински тестове за лична употреба

Тестове за бременност и овулация

- Дигитален тест за бременност | стр. 2
- Ранен тест за бременност | стр. 3
- Тест за бременност Classic | стр. 4
- Тест за овулация | стр. 5

Вирусни и бактериални инфекции

- Тест за стреп А | стр. 8
- Тест за *H. pylori* (стомашна язва) | стр. 9
- Тест за рота и аденовирус | стр. 10
- Тест за CRP | стр. 11
- Тест за уринарни инфекции 4-в-1 | стр. 12
- Реагентни ленти за анализ на урина 10-в-1 | стр. 13

Стомашно-чревно здраве

- Тест за функция на черния дроб | стр. 18
- Тест за *H. Pylori* (стомашна язва) | стр. 9
- Тест за глутен | стр. 23
- Тест за анемия | стр. 20
- Тест за окултно кървене (FOB) | стр. 19

Алергии и непоносимости

- Тест за алергии | стр. 22
- Тест за глутен | стр. 23

Анализ на урина

- Тест за уринарни инфекции 4-в-1 | стр. 12
- Реагентни ленти за анализ на урина 10-в-1 | стр. 13

Женско здраве

- Тест за менопауза | стр. 6
- Тест за функция на щитовидната жлеза | стр. 7

Респираторни инфекции

- Комбиниран тест б-в-1
FluA&B/2019-nCoV/RSV/ADV/MP | стр. 14
- Комбиниран тест за COVID-19 и грип А/В | стр. 15
- Назален тест за Covid-19 | стр. 16
- Тест за Covid-19 с проба от слюнка | стр. 17

Хранителни дефицити и метаболизъм

- Тест за желязодефицитна анемия | стр. 20
- Тест за витамин D | стр. 21
- Тест за функция на щитовидната жлеза | стр. 7
- Тест за функция на черния дроб | стр. 18

Мъжко здраве

- Тест за функция на простатата (PSA) | стр. 24
- Тест за функция на черния дроб | стр. 18

Тестове за наркотици

- Комбиниран тест за наркотици с 4 параметъра (4-в-1) | стр. 25
- Комбиниран тест за наркотици с 12 параметъра (12-в-1) | стр. 26